

Contiene 1 preservativo masculino de calidad superior.  
Preservativo de látex natural lubricado y con depósito. Válido para un solo uso.  
Conservar en lugar fresco y seco. Y no exponer a la luz directa del sol.  
Consultar la fecha de caducidad en el interior, y leer las instrucciones de uso.

Sexualidades

PROYECTO EDUCATIVO



#### INSTRUCCIONES DE USO



Rompa la envoltura sin dañar el preservativo, extrayéndolo con cuidado, evitando dañarlo con uñas o joyas.



Coloque el preservativo sobre la punta del pene erecto, y la parte enrollada por fuera, antes de cualquier contacto genital con la pareja.



Con una mano, coja el preservativo por el extremo cerrado, comprimiendo el depósito para expulsar todo el aire.



Con la otra mano, desenrolle el preservativo cuidadosamente a lo largo de todo el pene erecto hasta su base.



Retire el preservativo inmediatamente después de la eyaculación, antes de que desaparezca la erección, sujetándolo firmemente desde la base, para evitar que el esperma se derrame.



Deshágase del preservativo tirándolo a la papelera, nunca lo tire al inodoro.

- Ningún método anticonceptivo garantiza una protección del 100%.
- En caso de tratamiento eventual o alergia al látex, consulte primero con su médico.



**PRESTOSU**  
El condón asturiano

UNE-EN ISO 4074:2002



Distribuido por: CONDONIA, S.L.  
C/ Varsovia, 40, 08041 - Barcelona (España)  
www.condonia.com - Tel. (+34) 902 998 948

ENTREGA GRATUITA



SERVICIO DE SALUD  
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



GOBIERNO DE  
ASTURIAS

CONSEJO REGULADOR DE  
CONDONES DE ESPAÑA  
**cmpra.es**

CONDÓN  
MASCULINO  
DE LÁTEX  
LUBRICADO  
CON DEPÓSITO

